


Borrelia i flått, hurtigtest

Merk: For best resultat bør flåttene testes innen 48 timer etter fjerning.

Testen har en sensitivitet på 100 % og en spesifisitet på 92,86 %, noe som gjør den svært pålitelig til påvisning av *Borrelia*-bakterier i flått.

Fremgangsmåte

- Fjern flått med flåttang og sørg for å få med hele flåtten.
- Legg flåtten i testrøret og knus den grundig.
- Liten flått ($\varnothing < 5$ mm): Tilsett 4 dråper (ca. 160-200 μ l) av bufferløsningen i røret. Stor flått ($\varnothing > 5$ mm): ingen buffer skal tilsettes.
- Bruk pipetten til å suge opp flåtten.
- Drypp væsken på testkassetten (3 dråper for liten flått, 1 dråpe for stor flått).
- Stor flått: tilsett 2 dråper (80-100 μ l) buffer direkte i prøvevinduet etter at du har tilsatt flåttblandingen.

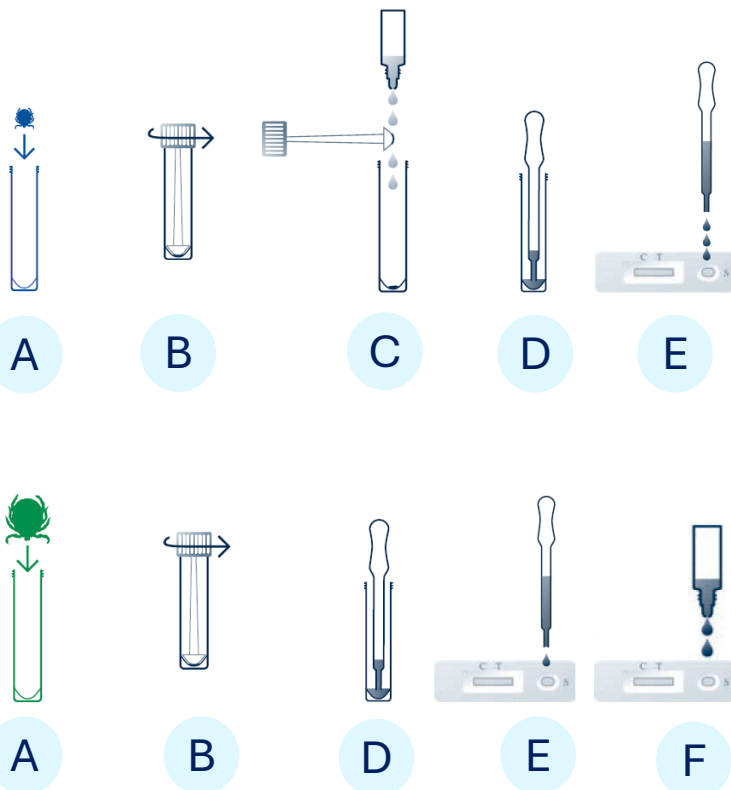

Tolking av test

- Positiv** = to linjer (C og T), flåtten bærer *Borrelia*.
- Negativ** = Én linje (C), *Borrelia* ikke påvist i flåtten
- Ugyldig** = ingen linje i C → test på nytt



Positiv



Negativ

Importert av:

NordicDx AS

Richard Johnsens gate 4

4021 Stavanger



Les resultater etter 10 minutter. Ikke avles etter 20 minutter.