


Urintest for urinveisinfeksjoner


Fremgangsmåte

- Samle en del av urinen i plastkoppen.
- Åpne posen og ta ut teststrimmelen. Ikke ta på testfeltene.
- Dypp teststrimmelen i urinprøven. Sørg for at alle fire testfeltene er nedsenket i ca. 1-2 sekunder.
- Ta deretter ut teststrimmelen og tørk av overflødig urin mot kanten av plastkoppen eller med et absorberende materiale (f.eks. tørkepapir).
- Vent i 2 minutter (ikke les resultatene etter 3 minutter). Les av resultatene separate for hver parameter ved å sammenligne fargen med fargekortet som følger med testen.

A

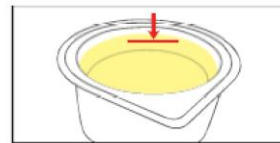


B

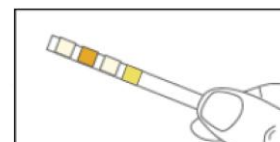

C




E

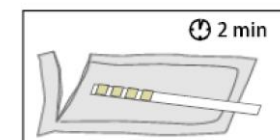

Tolking av test


- Negativt resultat

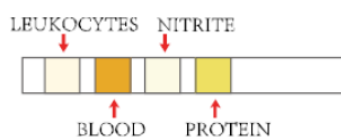

- Positivt resultat for leukocytter




- Positivt resultat for blod

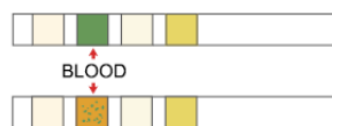

- Positivt resultat for nitritt



- Positivt resultat for protein

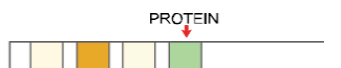

Importert av:

NordicDx AS

Richard Johnsens gate 4

4021 Stavanger



Les resultater etter 2 minutter. Ikke avles etter 3 minutter.